



vrlife



vrvitalis

NÁVOD VR VITALIS

Stažení aplikace z administrace

PŘIHLASTE SE K ADMINISTRACI

Webovou administraci VR VITALIS najdete na adrese:

<https://admin.vrvitalis.cz/>

Administrace je určena pouze pro registrované uživatele.

STÁHNĚTE SI SOUBOR S APLIKACÍ

Administrace VR Vitalis

- Hlavní stránka
- Můj profil
- Moje firma
- Uživatelé
- Licence
- Zařízení
- Stažení aplikace
- Pacienti
- Cvičení

Stažení aplikace do zařízení

APK soubor s aplikací

Pro nainstalování aplikace do zařízení (brýlí) použijte aplikaci SideQuest.

[Stáhnout soubor APK](#)

Seznam změn aplikace

Version 0.3.2

- new environment - Wasteland
- new module - Free Drawing
- EN/CZ localization
- Walk module - changed positions of signs

V záložce Stažení aplikace je k dispozici vždy poslední verze.

Kliknutím na tlačítko stáhnete aplikaci na svůj počítač.

Zde jsou vypsány změny od poslední verze aplikace.

JAK DÁLE S INSTALACÍ DO VR BRÝLÍ

Další postup je uvedeno v následujícím návodu k instalaci pomocí SideQuest a spuštění aplikace.

Pokud ještě nemáte připraveny VR brýle pro nahrání aplikace z neznámých zdrojů, postupujte podle daného návodu.

JSME VÁM K DISPOZICI

Máte otázky? Potřebujete pomoc?
Obrátte se na nás.

www.vrvitalis.cz/kontakt

